



panthera®

Monteringsanvisning

Enhandsdrift med quick release

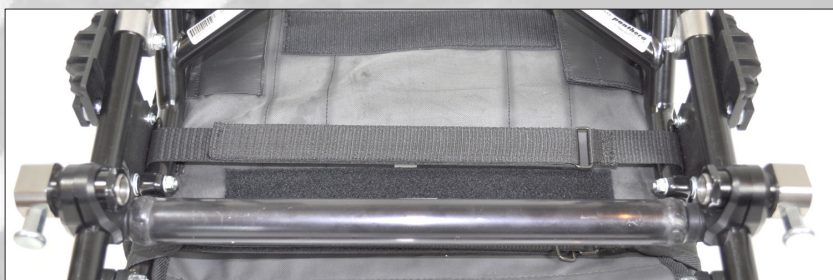


Demontera drivhjulerna och lägg rullstolen upp och ner för att komma åt bakaxeln. Enhandsdrift med QR monteras tillsammans med den gamla standard bakaxeln, och är stolen utrustad med Carbon bakaxeln så behöver man byta ut den mot den gamla standard bakaxeln.

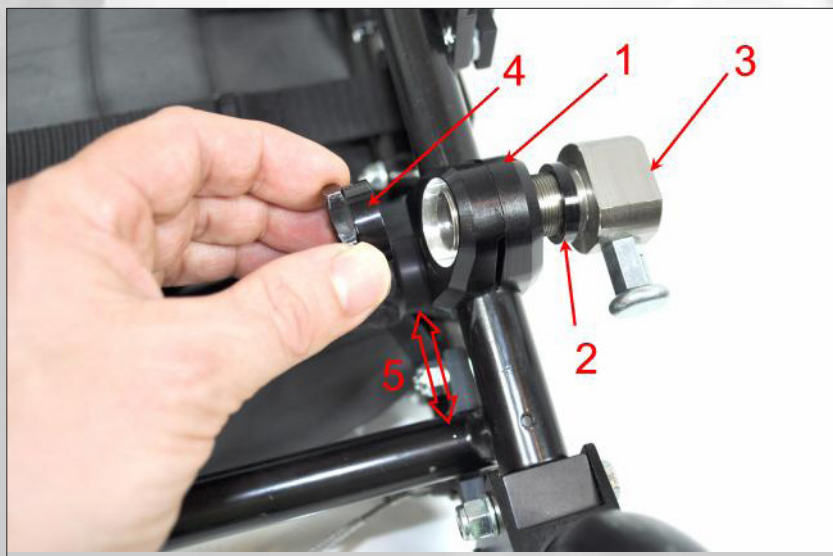


Byt ut det inre och yttre hjulfästet (1) mot de specialgjorda för QR. (art.nr. 3300015 resp. 3300014) Fästet med den djupa urfräsningen är det inre. Montera distansen (2) art.nr. 3300055 på drivhjulens axelfästet (3), 2st / sida på Bambino 3 och 1st / sida för övriga rullstolar, och för sen in axelfästet i hjulfästet (1). Montera muttern (4) på axelfästet. Rikta låssprinten på axelfästet (3) rakt bakåt, som bilden visar, och drag åt muttern för hand. Justera in bakaxeln till önskat läge och se till att måttet (5) blir lika på båda sidor. Drag åt muttern (4) ordentligt med en 25 mm nyckel.

Se sista sidan för info om olika hjulfästen.

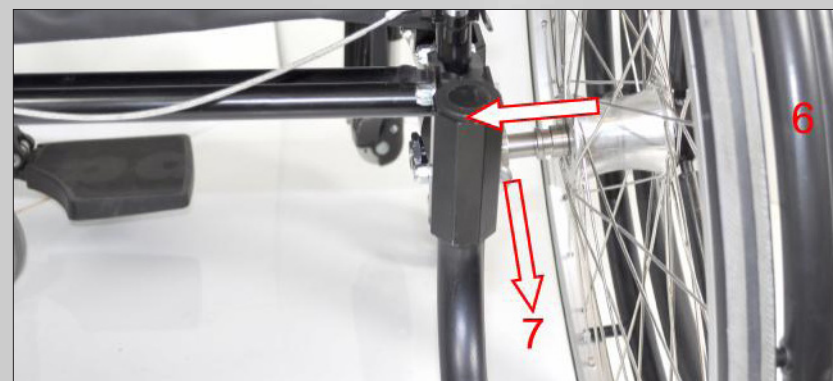

Montera drivhjulet med drivringar (6) på den sida som är aktuell för brukaren. För in drivhjulens axeln i drivhjulens axelfästet samtidigt som låssprinten (7) dras rakt ut. Kontrollera att axeln är helt inskjuten i botten. Gör likadant med det andra hjulet.

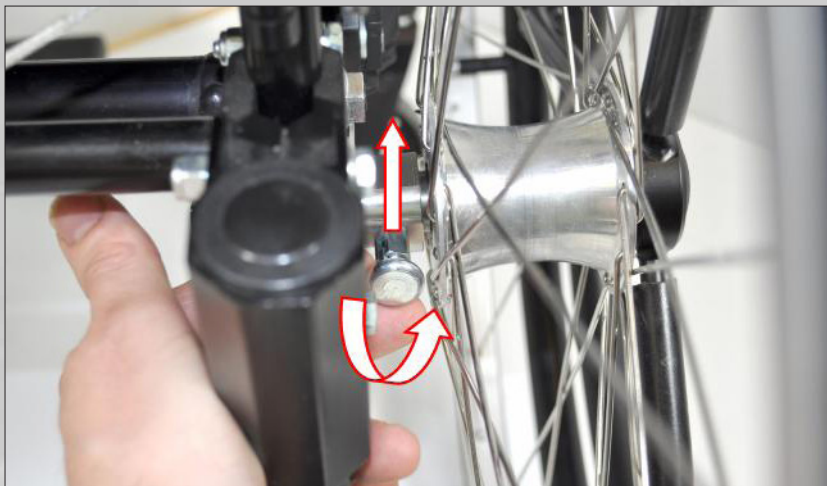

Vrid på låsspringen och kontrollera att den åker helt in och låser fast drivhjulet. Kontrollera på båda sidorna. **OBS! Viktigt!**



Passa in drivaxelns (8) ena ände på ena hjulaxeln (9) och pressa ihop den fjädrande drivaxeln så att den kan passas in på den andra hjulaxeln. Testa genom att dra i den mindre drivringen för att se om den driver det andra drivhjulet.

Delar som behövs till en komplett enhandsdrift.



Artikelnummer för enhandsdrift med QR: **1**
Består av 2st drivhjul med axelfästen och med 2st drivringar på ena drivhjulet

- art.nr. 1101520 Drivhjul 20" enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
- art.nr. 1101530 Drivhjul 20" enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
- art.nr. 1101522 Drivhjul 22" enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
- art.nr. 1101532 Drivhjul 22" enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
- art.nr. 1101524 Drivhjul 24" enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
- art.nr. 1101534 Drivhjul 24" enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett
- art.nr. 1101526 Drivhjul 26" enhandsdrift med QR med aluminium-ring par komplett
- art.nr. 1101536 Drivhjul 26" enhandsdrift med QR med friktions-ring par komplett

Artikelnummer för den gamla standardbakaxeln: **2**

- art.nr. 3300029 Bakaxel kpl 27 för enhandsdrift (stolsbredd 27)
- art.nr. 3300032 Bakaxel kpl 30 för enhandsdrift (stolsbredd 30)
- art.nr. 3300035 Bakaxel kpl 33 för enhandsdrift (stolsbredd 33)
- art.nr. 3300038 Bakaxel kpl 36 för enhandsdrift (stolsbredd 36)
- art.nr. 3300041 Bakaxel kpl 39 för vårdarbroms (stolsbredd 39)
- art.nr. 3300044 Bakaxel kpl 42 för enhandsdrift (stolsbredd 42)
- art.nr. 3300047 Bakaxel kpl 45 för enhandsdrift (stolsbredd 45)
- art.nr. 3300052 Bakaxel kpl 50 för enhandsdrift (stolsbredd 50)

Artikelnummer för drivaxel: **3**

- art.nr. 1100360 Drivaxel enhandsdrift konisk 195-235/27 (stolsbredd 27)
- art.nr. 1100361 Drivaxel enhandsdrift konisk 220-275/30-33 (stolsbredd 30-33)
- art.nr. 1100362 Drivaxel enhandsdrift konisk 255-315/33-36 (stolsbredd 33-36)
- art.nr. 1100363 Drivaxel enhandsdrift konisk 295-370/39-42 (stolsbredd 39-42)
- art.nr. 1100364 Drivaxel enhandsdrift konisk 350-460/42-50 (stolsbredd 45-50)

Skillnad mellan hjulfäste för enhandsbroms resp. vårdarbroms

För att kunna se skillnad mellan de olika fästena när de ligger på hyllan så har vi gjort detta informationsblad. Till [vårdarbroms](#) och [enhandsdrift](#) så används den [äldre standardbakaxeln](#) och till den används olika hjulfästen beroende på vilken av dessa man monterar på rullstolen. Till vårdarbromsen används inre hjulfäste med **art.nr. 3300010** och yttre med **art.nr. 3300004**. Till enhandsdrift används inre hjulfäste med **art.nr. 3300014** och yttre med **art.nr. 3300015**. Enklaste sättet att se vilket hjulfäste du har är att ta ett skjutmått och mäta nedre hålets diameter (se rödmarkerat på CAD-bild)

art.nr. 3300004
Hjulfäste yttre
vårdarbroms



Ritning

Framsida

Baksida

art.nr. 3300010
Hjulfäste inner
vårdarbroms



Ø 16.2

CAD



Ritning



Framsida



Baksida

art.nr. 3300014
Hjulfäste yttre
enhandsdrift



Ø 18.5

CAD



Ritning



Framsida



Baksida

art.nr. 3300015
Hjulfäste inner
enhandsdrift



Ø 18.5


CAD



Ritning



Framsida

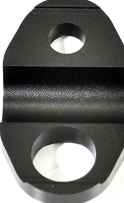

Baksida