

Byte av framgaffel på X




Demontering




Dessa verktyg behövs för att byta framgaffel på Panthera X.

- 1) Specialverktyg till framgaffel, inkluderad i Panthera X verktygsväska.
- 2) Insexnyckel 2,5 m eller senare revisioner, Torx T20.
- 3) Gänglåsning - svag (Loctite eller använd liknande svag gänglåsning)

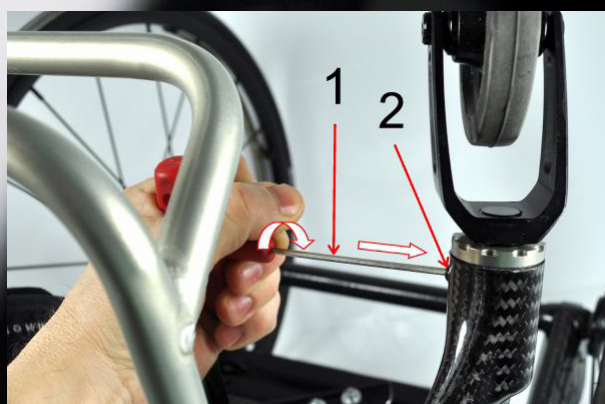

Lossa M4 skruven (2) med 2,5mm insexnyckel eller TorxT20 (1).

VIKTIGT! Se till att insexnyckeln eller torx-nyckeln (1) är ordentligt inne i skruvskallen (2) och håll den intryckt. Skruven är monterad med Loctite och du behöver göra en snabb distinkt vridning moturs med nyckeln (1) för att skruven (2) ska lossna.

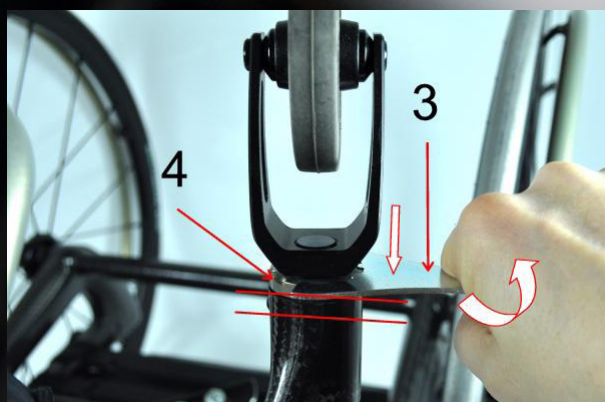

Placera specialverktyget (3), som finns inkluderad i Panthera X verktygsväska, runt "mutter-låset"(4).

VIKTIGT! Se till att alla slitsar på verktyget (3) ligger i rätt position mot mutter-låset (4) och att hålla verktyget parallellt med mutter-låset, när du gör en distinkt moturs vridning. Var noga med att inte skada slitsarna på mutter-låset.




Demontera framgaffeln från rullstolen.



Montering

Innan montering, så lägg en liten mängd svag gäng-låsning på gängorna.

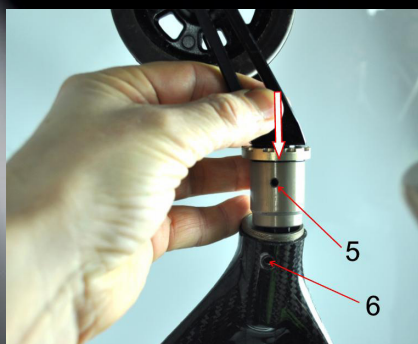

För in framgaffeln i chassit. Rikta in hålen mot varandra (5 och 6)

Skruva i M4 skruven lätt.

Drag åt mutter-låset ordentligt.

Drag åt M4 skruven ordentligt.