

BROMS S3



Monteringsanvisning för:
Broms S3
gäller även med bromsspaksförlängare
art.nr. 4630000, 4630001, 4630002, 4630010
4630011, 4630012



Länk till video

Verktyg som behövs:

Insexnyckel 5 mm



1) Fästet på bromsen (inringat) monteras runt ramröret.



2) Bromsen på plats i en ungefärlig position. Justeras in sen.




3) Drag åt skruven lite lätt med insexnyckel 5 mm.



4) Lås bromsen och kontrollera att bromsbladet går in det välpumpade däcket ca 5 mm.



5) Vid behov så justera in bromsen i djupled så att bromsverkan blir tillräcklig

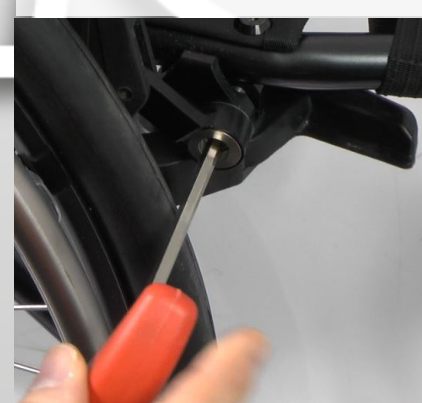

6) När bromsen är rätt injusterad så drag åt ordentligt med insexnyckel 5 mm. Upprepa proceduren 1- 6 för bromsen på andra sidan.